

GILUPLASTER SP2



Dental

**Wysokiej jakości gips alabastrowy typu 2 na modele w protetyce stomatologicznej.
Spełnia wymagania normy EN ISO 6873-2**

Właściwości fizyczne :

Czas wiązania 6 - 10 min.
Rozszerzalność liniowa przy wiązaniu maks. 0,3 %
Wytrzymałość na ściskanie po 1 h min. 9 N / mm²

Stosowanie :

Proporcje mieszania
GILUPLASTER SP2 : woda 100g : 55-60 ml
Woda : gips 0.55 -0,60ml : 1 g

Temperatura pracy ok. 23 °C

Szybko w czasie nie dłuższym niż 10 sek. wsypać w podanych proporcjach gips do wody i odczekać ok. 20 sek. w celu całkowitego wchłonięcia wody przez gips.

Mieszanie mechaniczne : 30 sek.
Mieszanie ręczne : 60 sek.

Po upływie tego czasu gips osiąga optymalną konsystencję do wylewania do form modelowych na stoliku wibracyjnym.

Czas wylewania ok. 5 min

Po upływie tego czasu wyłączyć stolik wibracyjny aby nie zakłócać przebiegu krystalizacji.

Opakowania

Worki papierowe foliowane 25 kg .

Przechowywanie :

Co najmniej 12 miesięcy w szczelnym nie przepuszczającym wilgoci opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Po każdorazowym otwarciu opakowanie należy dokładnie zamknąć.

Stosować w okresie ważności podanym na etykiecie.

UWAGI :

GILUPLASTER SP2 podobnie jak inne gipsy, jest wrażliwy na kontakt z wilgocią i dlatego należy unikać kontaktu z powietrzem. Przechowywać w suchym miejscu.

Do przepakowywania należy stosować materiały chroniące gips przed wpływem wilgoci np.

- laminowana folia aluminiowa,
- pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego o ścianie grubości min. 0,5 mm

Każdorazowo po użyciu pojemnik taki należy szczelnie zamykać i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Gips **GILUPLASTER SP2**, który był przechowywany w wyjątkowo niskiej temperaturze należy przed użyciem sezonować kilka godzin do osiągnięcia temperatury pokojowej.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Gwarantujemy jakość produktu zgodną z naszą specyfikacją.

Ze względu na fakt, że właściwe wykorzystanie przedstawionego produktu jest poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć z tego tytułu żadnej dalszej odpowiedzialności.

Wersja polska, maj 2013