

# GIPS ARTYKULACYJNY



Dental

## Twardy syntetyczny gips artykulacyjny

Gips artykulacyjny stosowany jest

- do prac artykulacyjnych z modelami roboczymi,
- do mocowania uzupełnień korygujących,
- do mocowania modeli gnat-ortodontycznych,
- na podstawy w technice frezowania

### Właściwości fizyczne :

Czas wiązania (czas pracy)	ok. 3,5 min.
Wytrzymałość na ściskanie : po 24 godzinie,	ok. 20 N / mm <sup>2</sup>
Twardość po 24 godzinach	ok. 50 N / mm <sup>2</sup>
Rozszerzalność liniowa przy wiązaniu po 2 godzinach	ok. 0.03 %

### Stosowanie :

Proporcje mieszania

<b>Gips artykulacyjny</b> : woda destyl.	100 g : 30 ml
Temperatura pracy	ok. 23 °C

Szybko w czasie nie dłuższym niż 10 sek. wsypać w podanych proporcjach gips do wody

Mieszanie mechaniczne :	30 sek.
Mieszanie ręczne :	60 sek.

Po upływie czasu pracy nie wytrząsać odlewu na stoliku wibracyjnym aby nie zakłócać przebiegu krystalizacji.

### Opakowania :

Worki papierowe foliowane	25 kg,
Przenośne kartony z workiem foliowym	20 kg
Pojemniki z tworzywa sztucznego (cztery pojemniki w kartonie 20 kg)	4.5 kg
Cztery pojemniki z tworzywa w kartonie	18 kg

### Okres trwałości :

Co najmniej 12 miesięcy przy przechowywaniu w szczelnym nie przepuszczającym wilgoci opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

### UWAGI :

**Gips artykulacyjny**, podobnie jak inne gipsy, jest wrażliwy na wilgoć. Należy unikać zbędnej ekspozycji otwartego pojemnika na powietrzu. Przechowywać w suchym miejscu.

Do przepakowywania należy stosować materiały chroniące gips przed wpływem wilgoci np.

- laminowana folia aluminiowa,
- pojemniki z polietylenu niskociśnieniowego o ściance grubości min. 0,5 mm

Każdorazowo po użyciu pojemnik należy szczelnie zamykać i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

**Gips artykulacyjny**, przechowywany w niskiej temperaturze należy przed użyciem sezonować kilka godzin do osiągnięcia temperatury pokojowej.

Powyższe zalecenia podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Gwarantujemy jakość produktu zgodną z naszą specyfikacją.

Ze względu na fakt, że właściwe wykorzystanie prezentowanego produktu jest poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć z tego tytułu żadnej dalszej odpowiedzialności.

*Wersja polska, maj 2013*